


COMO UTILIZAR CORRETAMENTE O SEU PRESERVATIVO PRESERV® EXTRA SENSITIVITY

Preserv® Extra Sensitivity foi desenvolvido com a finalidade de evitar o contato direto entre os órgãos genitais e entre o esperma e a vagina. Sua lubrificação com óleo de silicone associada à sua espessura menor (que confere maior sensibilidade) proporciona uma relação sexual natural com mais conforto, maior segurança e confiabilidade, sem diminuir o prazer. Seu USO CORRETO revela-se excelente método anticoncepcional, que permite o planejamento familiar; além disso, reduz significativamente o contágio das doenças sexualmente transmissíveis (DST) como AIDS, sífilis, blenorragia e outras.

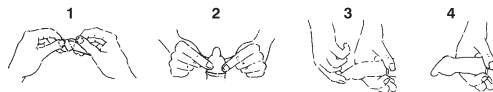

MODO DE USAR (veja a ilustração): 1 - Abra o envelope sempre pelo picote, que está na parte inferior. Não abra o envelope com objetos afiados ou pontiagudos (unhas ou dentes). Retire o preservativo do envelope somente na hora do uso. 2 - Coloque o preservativo pela ponta do pênis ereto, porém não o faça com as unhas. 3 - Comprima a ponta do preservativo, entre o polegar e o indicador, a fim de que não permaneça ar no reservatório. 4 - Desenrole o preservativo

sobre o pênis até o fim observando o lado certo. **IMPORTANTE:** • Antes de abrir a embalagem, verifique o prazo de validade. • Após a ejaculação, retire o pênis ainda ereto da vagina, com cuidado, segurando o preservativo pela bainha (anel de látex), para que o mesmo não escape e cause vazamentos. • Depois da retirada, evite que o pênis ou o próprio preservativo entre em contato com a vagina. • Cada preservativo deve ser usado apenas UMA vez. • Guarde-os em lugar seco e arejado, longe do sol e do calor. • Não teste o preservativo, pois existe o risco de danificá-lo. • Sempre coloque o preservativo antes de qualquer contato do pênis com a vagina, pois frequentemente ocorre uma emissão prematura de esperma. • Nunca jogue preservativos no vaso sanitário. • Em caso de reação alérgica, suspenda o uso do produto e procure orientação médica. • **Não utilize o preservativo com pomadas medicinais, cremes hidratantes, loções para bebês, vaselina ou outros lubrificantes à base de óleo mineral (petróleo) ou vegetal; eles danificam qualquer preservativo de látex em poucos minutos.** Para escolha do método contraceptivo a ser adotado, consulte o seu médico. Lembre-se que "nenhum método contraceptivo é absolutamente eficiente, ISTO, ENTRETANTO, NÃO DIMINUI EM NADA A IMPORTÂNCIA DO PRESERVATIVO QUANDO USADO CORRETAMENTE". Lote, Fabricação e Validade, no verso da embalagem. Se adquirir este produto com o prazo vencido, ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo nº 0800-701-6399 ou mande um e-mail para sac@preserv.com.br